


5


Elektroden anbringen
wie auf der Grafik abgebildet.

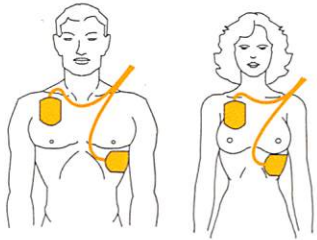

Korrekte Elektrodenplatzierung bei
Erwachsenen und Kindern > 8 Jahren.

6

Nach Aufforderung die
leuchtende Schocktaste
drücken.

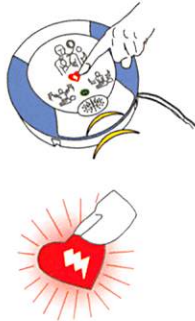

7


Während der Schockabgabe
den Patienten nicht berühren!



Bei vollautomatischen Defi-
brillatoren wird der Schock
nach Abzählen 3 - 2 - 1
automatisch ausgelöst!

8

Fahren Sie im Wechsel mit
Herzdruckmassage, Beatmen
(falls geübt) und **Schocken**
(falls erforderlich) fort.

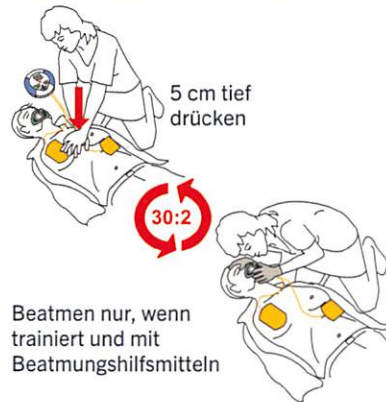

Beatmen nur, wenn
trainiert und mit
Beatmungshilfsmitteln

Fortsetzen bis der Notarzt eintrifft oder
der Patient wieder reagiert.

MEDX5

Besuchen Sie unsere
kostenfreie Online-Schulung:
www.defi-schulung.de

Citizens
SAVE LIVES



Machen Sie Ihren
herzsicheren Defi-
Standort auf der
kostenlosen CISALI-
Notfall-App bekannt.



CISALI



iOS



Android

MedX5 GmbH & Co. KG, Humboldtstr. 9
86316 Friedberg/Bay., www.medx5.com

Copyright MedX5 2021

NOTFALL- ANWEISUNGEN

Jeder kann es! Jeder darf es!



1

Im Notfall Ruhe bewahren!
Opfer und sich selbst aus dem Gefahrenbereich bringen.



Prüfen

Person laut ansprechen,
an den Schultern rütteln,
Atmung kontrollieren.
Eigenschutz beachten!



112

Rufen

Drücken

Wenn keine Reaktion und keine Atmung,
Notruf absetzen, nach Hilfe rufen und
Defibrillator holen lassen.

2

Oberkörper freimachen.
Sofort mit der
Herzdruckmassage (HLW)
beginnen!



5 cm tief
drücken

30:2

Beatmen nur, wenn
trainiert und mit
Beatmungshilfsmitteln

30x drücken, 2x beatmen (falls geübt).
Ansonsten nur Herzdruckmassage
100-120/min.

3


Defibrillator einschalten.
Folgen Sie den
Sprachanweisungen und
Piktogrammen.




1. Einschalten



2. Grüne
Lasche ziehen

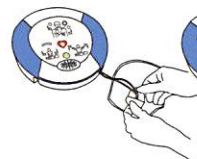

3. Schutzfolie
aufreißen

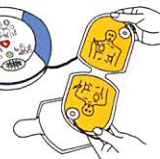


4. Elektroden
entnehmen

Sie können nichts verkehrt machen!

4

Vorbereiten des Patienten.

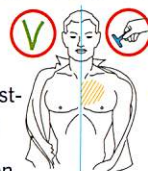

Starke Brust-
behaarung
an den
Klebestellen
rasieren



Nasse oder
fettige Haut
trocknen



Bei Frauen
Büstenhalter
entfernen



Zubehör ist in der Transporttasche.